

KOD KATALOGOWY	OKD-23
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ OKD-23
CODE	OKD-23
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	LOWER-EXTREMITY SUPPORT OKD-23




- 1. PL:** Załóż ortezę na nogę i podciągnij do góry w taki sposób, aby rzepka znalazła się w pierścieniu okolorzepakowym.
EN: Place the brace on the leg and pull up to keep the kneecap in the patellar donut.




- 2. PL:** Zapnij pasy rzepowe (1,2) według wskazanej kolejności.
EN: Fasten the Velcro straps (1,2) according to the following steps.



- 3. PL:** Zapnij pasy rzepowe (3 i 4) według wskazanej kolejności.
EN: Fasten the Velcro straps (3 and 4) according to the following steps.

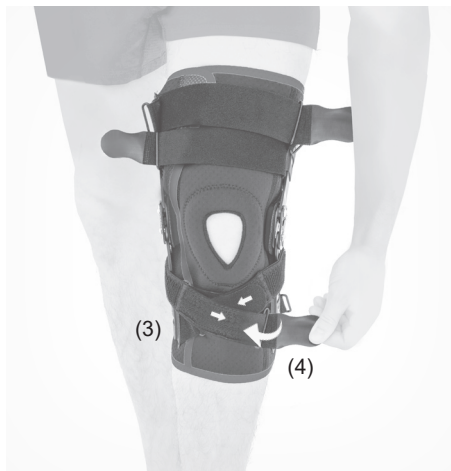

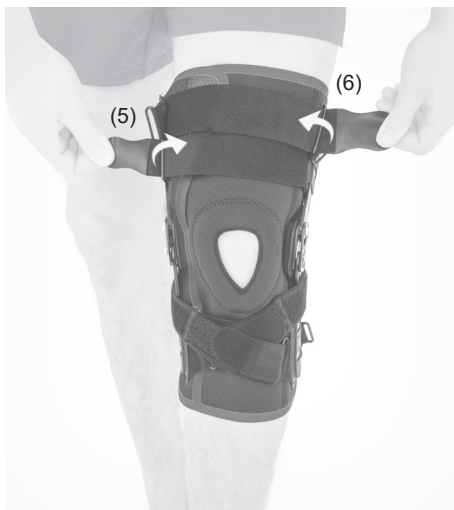

4. **PL:** Zapnij pasy rzepowe (5 i 6) według wskazanej kolejności.
EN: Fasten the Velcro straps (5 and 6) according to the following steps.



5. **PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.