

KOD KATALOGOWY	AM-SOB-02
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ
MODEL	AM-SOB-02
CODE	AM-SOB-02
TRADE NAME	UPPER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	AM-SOB-02





**1. PL:** Rozepnij ortezę, umieść szelki (1) na ramionach i wsuń rękę w temblak (2).

**EN:** Unfasten the brace, place the harness (1) over your shoulders and slide your hand into the sling (2).



**2. PL:** Skrzyżuj na plecach pasy naramienne (3) jednocześnie przekładając je do przodu.

**EN:** Cross the shoulder straps (3) and move them forward.

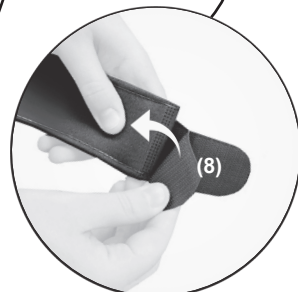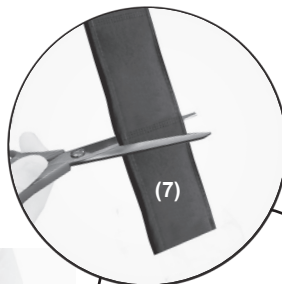

**3. PL:** Włóż pasy w szelki (4) znajdujące się od spodniej części temblaka i zapnij je na rzepy (5,6) z przodu ortozy. Jeśli jest potrzeba, odetnij zbędną długość taśmy (7). Dopnij rzep (8) do paska i zapnij go.

**EN:** Place the straps in the loops (4) on the underside of the sling and fasten them with Velcro (5,6) on the front of the brace. If necessary, cut off any unnecessary length of tape (7). Attach the Velcro (8) to the strap and close it.



4. **PL:** Ustaw osłony szyi (9) w odpowiednim miejscu.  
**EN:** Place the neck covers (9) in the right place.



5. **PL:** Przypnij pas obwodowy (10) do przedniej części temblaka, owiń go wokół tułowia i ręki. Następnie zapnij z przodu na rzep (11).  
**EN:** Attach the circumferential strap (10) to the front of the sling, wrap it around your torso and arm. Then fasten the Velcro closure at the front (11).



6. **PL:** Gotowy wyrób.  
**EN:** Product is ready to use.