

KOD KATALOGOWY	EB-N-02
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA NADGARSTKA
MODEL	EB-N-02
CODE	EB-N-02
TRADE NAME	WRIST ORTHOSIS
MODEL	EB-N-02



- 1. PL:** Załóż ortezę na rękę.
EN: Put the brace on the wrist.



- 2. PL:** Zapnij rzep (1).
EN: Fasten the Velcro closure (1).



- 3. PL:** Zapnij taśmę według wskazanego kierunku.
EN: Fasten the Velcro straps according to the indicated direction.



- 4. PL:** Zapnij rzep (2).
EN: Fasten the Velcro closure (2).



- 5. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.

